



Systane[®] BALANCE

BENETZUNGSTROPFEN FÜR DIE AUGEN

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um sie später noch einmal nachlesen zu können.

BESCHREIBUNG:

SYSTANE[®] BALANCE Benetzungstropfen für die Augen sind Lipid-haltige Tropfen zur Therapie Trockener Augen. **SYSTANE[®] BALANCE** Benetzungstropfen befeuchten die Augenoberfläche, ergänzen und stabilisieren die Lipidschicht des Tränenfilms und vermindern eine exzessive Verdunstung der Tränenflüssigkeit.

SYSTANE[®] BALANCE Benetzungstropfen für die Augen bieten lang anhaltende Linderung der Symptome Trockener Augen wie Brennen und Irritationen.

Bei **SYSTANE[®] BALANCE** handelt es sich um eine sterile Lösung mit folgenden Inhaltsstoffen: Propylenglykol, Hydroxypropyl-Guar, dünnflüssiges Paraffin, Dimyristoylphosphatidylglycerol, Polyoxyl-40-stearat, Sorbitantristearat, Borsäure, Sorbitol, Dinatriumedetat und POLYQUAD[®] (Polydroniumchlorid) 0,001 % als Konservierungsmittel.

ANWENDUNGSGEBIETE

SYSTANE[®] BALANCE sind Benetzungstropfen zur Therapie Trockener Augen.

SYSTANE[®] BALANCE lindert die Symptome des Trockenen Auges wie Brennen und Irritationen.

GEGENANZEIGEN (Gründe gegen eine Anwendung):

Wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe von **SYSTANE[®] BALANCE** sind, sollten Sie dieses Produkt nicht verwenden.

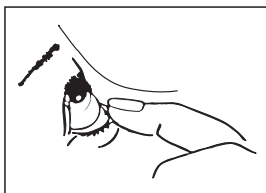
ANWENDUNGSHINWEISE:

SYSTANE[®] BALANCE kann täglich nach Bedarf angewendet werden.

Waschen Sie Ihre Hände vor der Anwendung von Augentropfen.

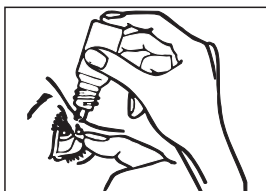

Öffnen Sie die Flasche, ohne die Tropferspitze zu berühren. Halten Sie die Flasche zwischen Daumen und Fingern mit der Öffnung nach unten.

Kopf leicht nach hinten neigen, Blick nach oben richten und mit dem Zeigefinger Unterlid wegziehen.



Durch leichten Druck auf den Flaschen**boden** der Drop-Tainer[®]-Flasche 1 Tropfen von oben in den Bindehautsack eintropfen, ohne dass die Flaschenspitze mit dem Auge oder Lidrand in Berührung kommt.

Geben Sie 1 Tropfen ins Auge und blinzeln Sie.

SYSTANE[®] BALANCE ist auch zur Behandlung trockener Augen, die im Zusammenhang mit dem Tragen von Kontaktlinsen auftreten.

Anwendung: Vor dem Einsetzen und nach dem Herausnehmen der Kontaktlinsen ins Auge tropfen.

WARNHINWEISE:

Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers und die Packungshinweise zur korrekten Anwendung des Produktes beachten. Wenn es zu anhaltenden Augenbeschwerden, übermäßigem Tränenfluss, Sehveränderungen oder Augenrötung kommt, suchen Sie Ihren Arzt oder Apotheker auf, da sich die Beschwerden verschlimmern könnten.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Vermeiden Sie jedes Berühren der Tropferspitze der Flasche oder deren Kontakt mit Gegenständen, um Verunreinigungen zu verhindern.
- Nach Gebrauch wieder schließen.
- Bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Flasche bei Nichtgebrauch stets verschlossen halten.
- Vor dem auf Packung und Flasche angegebenen Verfalldatum verwenden. ⏰
- Verwerfen Sie Restmengen der Augentropfen sechs Monate nach Anbruch der Flasche.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

PACKUNGSGRÖSSEN:

SYSTANE[®] BALANCE Benetzungstropfen für die Augen ist als dampfsterilisierte und sterilfiltrierte Lösung in der Plastikflasche zu 10 ml erhältlich.

STERILE A

VERTRIEB für Deutschland

Alcon Pharma GmbH
Blankreutestraße 1
79108 Freiburg

VERTRIEB für Österreich

Alcon Ophthalmika GmbH
Mariahilferstraße 120
1070 Wien

HERSTELLER:

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

EU-BEVOLLMÄCHTIGTER:

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Boundary Way
Hemel Hempstead
Hertfordshire
HP2 7UD Vereinigtes Königreich

US-Patent-Nrn. 6 403 609, 6 583 124, 6 838 449 und
Europäische-Patent-Nrn. 0999825 und 1348427



© 2011 Alcon, Inc.