

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2021-09

Medizid® Rapid+

Hochwirksame, gebrauchsfertige Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Oberflächen und Gegenstände /
High-performance, ready-to-use rapid disinfectant for alcohol-resistant surfaces and objects



Technische Information / technical information

REF	Packungsinhalt / box contents	Verpackung / shipping unit	PZN
01002+	250 ml	12 Flaschen pro Karton / 12 bottles per carton	16015216
00975+	500 ml	18 Flaschen pro Karton / 18 bottles per carton	16015222
00976+	1 l	12 Flaschen pro Karton / 12 bottles per carton	16015239
00977+	5 l	2 Kanister pro Karton / 2 canisters per carton	16015245

Einwirkzeiten / Contact times	
Bakterizid, levurozid (hohe Belastung) / Bactericide, yeasticide (high load)	1 min.
Mykobakterizid (hohe Belastung) / Mycobactericide (high load)	30 sec.
Fungizid (geringe Belastung) / Fungicide (low load)	5 min.
Begrenzt viruzid (MVA, BVDV) / Limited virucidal (MVA, BVDV)	1 min.
Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus, Norovirus) / Limited virucidal PLUS (Adenovirus, Norovirus)	5 min.
Viruzid (Poliovirus) (geringe Belastung) / Virudical (Poliovirus) (low load)	5 min.

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung / Product description Zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen, nur für den professionellen Gebrauch /
For the disinfection of alcohol-resistant surfaces in the patient's immediate environment in hospitals, medical practice, outpatient units, nursing homes and in industry.

Anwendung / Application Das gebrauchsfertige Produkt kann im Sprühverfahren, im Wischverfahren mit Hilfe eines Einmaltuchs / Wischmopp, oder in einer Kombination aus Sprüh- / Wischverfahren verwendet werden. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht halten, um die Wirksamkeit zu erzielen. Dabei die entsprechenden Einwirkzeiten beachten. Einsetzbar zur Flächendesinfektion von Medizinprodukten und Oberflächen im medizinischen Umfeld. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. invasiven und semikritischen und kritischen Medizinprodukten. Für alkoholunbeständige Flächen, wie Acrylglas und Polycarbonat, aber ebenso auf Aluminium ist die Anwendung nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen. /

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

The ready-to-use product can be used by spraying, by wiping with the help of a disposable cloth / mop, or by a combination of spraying / wiping. Remove visible contamination before disinfection. Keep the surface moist for the entire exposure time to achieve effectiveness. Observe the corresponding exposure times. Can be used for surface disinfection of medical devices and surfaces in the medical environment. Excluded are surfaces of instruments or semi-critical and critical medical devices and invasive medical devices. For surfaces that are not resistant to alcohol, such as acrylic glass and polycarbonate, but also on aluminium, the application is not recommended without restrictions. If necessary, check material resistance on inconspicuous areas.

Zusammensetzung /
Composition

Wirkstoffe in 100 g / Active substances in 100 g:
0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 63,5 g Ethanol
0.05 g didecyldimethylammonium chloride, 63.5 g ethanol

Haltbarkeit /
Shelf life

Haltbarkeit: 3 Jahre (s. Etikettendruck). Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate. Behältnisse gut verschlossen halten. Lagerung und Aufbewahrung unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost). /
3 years (see label). Shelf life after breaking seal: 12 months. Keep containers closed tightly. Warehousing and storage under standard storage conditions (protect from moisture, direct sunlight, heat and frost).

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie /
Category

Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG /
Medical device class IIa according to directive 93/42/EWG

VAH gelistet /
VAH listed

Gefahrenhinweise /
Hazard warnings

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. /
Highly flammable liquid and vapour. Causes severe eye irritation. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. Do not smoke. Keep container tightly closed. Wear protective gloves / clothing / eye protection / face protection. If eye irritation persists: Seek medical advice / attention.